

1



To open the Revolizer, hold the base of the Revolizer with one hand and pull back the mouthpiece till the arrows meet.

একটি হাত দিয়ে রিভোলাইজার এর নিচের অংশটি ধরে মাউথপিসটি খুলে ফেলুন যতক্ষণ না পর্যন্ত “তীর চিহ্ন” দুটি পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

2



Remove a medication capsule from the Blister Strip, place in the capsule chamber, with the transparent end first.

একটি কোজিক্যাপ ক্যাপসুল ব্লিস্টার থেকে খুলে ক্যাপসুল চেম্বারে প্রবেশ করান। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ অংশটি নিচের দিকে রাখুন।

3



Close the mouthpiece firmly until a click sound is heard which indicates proper locking of the Revolizer.

মাউথপিসটি ভালভাবে বন্ধ করুন।

4



Breathe out completely.

পুরোপুরি শ্বাস ছেড়ে দিন।

5



Grip the mouthpiece between your teeth and seal your lips around it.

ভালভাবে মাউথপিসটি মুখের ভিতরে আটকে ফেলুন। যাতে কোন বাতাস প্রবেশ করার সুযোগ না থাকে।

6

Keep your head upright and breathe in through your mouth as deeply as you can. If done correctly, the capsule will vibrate inside the Revolizer.

মাথাটি সোজাসুজি রেখে যথাসম্ভব গভীরভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করুন। যদি সঠিকভাবে করা হয়ে থাকে, তাহলে কোজিক্যাপটি ভিতরে কম্পিত হবে।

7



Remove the Revolizer from your mouth and hold your breath for 10 seconds. Hold your breath as long as comfortable and then resume normal breathing. At times, step 6 may be repeated to ensure that all the powder has been inhaled which can be seen through the chamber.

রিভোলাইজারটি মুখ থেকে সরিয়ে ১০ সেকেন্ড এর জন্য নিঃশ্বাস ধরে রাখুন। প্রয়োজন হলে ৬ নাম্বার ধাপটি পুনরায় সম্পন্ন করুন যাতে করে কোজিক্যাপের গায়ে কোন পাউডার অবশিষ্ট না থাকে।

8



After every use, open the mouthpiece again to discard the used medication capsule. Close the mouthpiece and store in the pouch provided for the next use. Clean the Revolizer when needed by wiping the mouthpiece and the capsule chamber with a dry cloth. Avoid breathing out into your Revolizer. For subsequent use, take a fresh DPI capsule and follow Steps 1-8.

প্রতিবার ব্যবহারের পর মাউথপিসটি খুলে ব্যবহৃত কোজিক্যাপটি ফেলে দিন। অতঃপর মাউথপিসটি বন্ধ করে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য পাউচ এ সংরক্ষণ করুন। প্রয়োজন হলে শুকনো ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মাউথপিস ও ক্যাপসুল চেম্বারটি পরিষ্কার করে নিন।



This QR code provides a link of 'How to use Revolizer'. Download a QR code reader application from any smart phone to scan the code and view the link accordingly.

Since 1958



SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd



This is circulated with the prior approval of Licensing Authority (Drugs). For Medical Professionals only. TM - Trade Mark. Leaflet-01/2017/JUL/rp